

besser **SCHLAFEN**
besser **LEBEN**



Produktdatenblatt FLOvoice
Sprachausgabe für FLO Geräte

FLO
MEDIZINTECHNIK

FLOvoice

Artikel-Nr. 40300070

HMV – Nr. 14.24.14.0011

Mai 2013

Funktion

Das Sprachausgabemodul FLOvoice ist ein optionales Zusatzgerät, um schlecht sehenden und blinden Patienten, eine leichtere Bedienung der FLO Geräte zu ermöglichen. Hierbei werden die angezeigten Texte akustisch auf dem integrierten Lautsprecher ausgegeben

Anschluss

Das Sprachausgabemodul wird über die serielle Kommunikationsleitung des FLO Gerätes verbunden. Hierfür ist am Sprachausgabemodul eine 9-polige SUB-D Stiftleiste vorhanden.

Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung des Sprachausgabemoduls FLOvoice erfolgt über das FLO Gerät. Das Modul ist sofort nach dem Einschalten des Gerätes betriebsbereit.

Sprachausgabe

Die akustische Ausgabe durch das Sprachausgabemodul FLOvoice erfolgt über einen integrierten Lautsprecher.



Integrierter Lautsprecher



Das Sprachausgabemodul erhält vom angeschlossenen FLO Gerät, neben den eigentlichen Displaytexten auch Informationen bzgl. der Textausgabe.

Bei Fehlermeldungen des FLO Gerätes, wird diese z.B. solange akustisch ausgegeben, wie der jeweilige Fehler vorhanden ist. Andere Texte werden nur einmalig ausgegeben, wie z.B. die Bereitschaftsanzeige des FLO Gerätes (Standby). Displaytexte in den Menüs werden bei Parameteränderung immer wieder aktualisiert, d.h. bei Änderung erneut ausgegeben.

Technische Daten

Stimme:	„Julia“ (Linguatex, Voice Reader)
Lautstärke:	1 – 5 am FLO Gerät einstellbar
Spannung:	Versorgung durch FLO Gerät
Stromaufnahme:	ca. 100 mA
Schutzklasse:	III
Kommunikation:	serielle Schnittstelle (RS232) 9 poliger SUB-D-Anschluss
Gewicht:	ca. 200 g
Abmessungen:	170 x 60 x 25 mm