

besser **SCHLAFEN**
besser **LEBEN**

Gebrauchsanleitung **FLO Flexi Adapter**

Deutsch

Mehr Lebensqualität
mit FLO Therapiegeräten

 **FLO**
MEDIZINTECHNIK

Kennzeichnungen



Name und Anschrift des Herstellers



Gebrauchsanweisung beachten



Artikelnummer und Artikelbezeichnung



Achtung! Warnhinweise in der
Bedienungsanleitung beachten!

Vorwort

Vorwort

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt die Handhabung und Reinigung des FLO Flexi Adapters.

Verwendungszweck

Der FLO Flexi Adapter wird als flexible Einheit zwischen Maske und Schlauchsystem installiert. Durch die bessere Flexibilität wird die Hebelwirkung des Schlauches an der Maske verringert und somit ein Anheben der Maske verhindert. Einer Leckage an der Maske wird so vorgebeugt.

Sicherheitshinweise

Beim FLO Flexi Adapter handelt es sich um einen Zusatzartikel, der mit allen gängigen Masken- und Schlauchsystemen für schlafbezogene Atmungsstörungen kombiniert werden kann. Der Adapter darf nur eingesetzt werden, wenn der jeweilige Therapiegerätehersteller eine Schlauchverlängerung zulässt. Bitte beachten Sie hierzu die entsprechenden Gebrauchsanweisungen der Hersteller.

Die FLO Medizintechnik GmbH kann keine Verantwortung für die Sicherheit und die Eigenschaften des Systems übernehmen, wenn die Inhalte der Gebrauchsanweisung nicht eingehalten werden, bauliche oder technische Veränderungen am System vorgenommen werden oder vom Hersteller nicht zugelassene Zubehörteile verwendet werden.

Installation FLO Flexi Adapter

Zur Installation des FLO Flexi Adapters ist zusätzlich die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Gerätes und Maskensystems hinzu zu ziehen.

Installation FLO Flexi Adapter

Eine Reinigung des FLO Flexi Adapters vor Inbetriebnahme ist nicht notwendig.



Der FLO Flexi Adapter besteht aus einer Silikonmanschette und einem Drehgelenk.

Installation bei Masken mit integriertem Auslasssystem:
Der FLO Flexi Adapter wird mit dem Drehgelenk an die Muffe des Schlauchs und mit der Silikonmanschette an den Maskenanschluss angeschlossen.

Installation bei Masken ohne integriertes Auslasssystem:
Zuerst muss das Auslasssystem mit dem Schlauch verbunden werden. Schließen Sie dann die Silikonmanschette an das Auslasssystem und das Drehgelenk an den Maskenanschluss an.

Achten Sie in beiden Fällen auf die korrekte Länge des Druckmessschlauches (falls vorhanden). Dieser sollte bis in das Winkelstück der Maske ragen.

Start der Therapie

Start der Therapie

Nach der korrekten Installation des FLO Flexi Adapters kann wie gewohnt mit der Therapie begonnen werden.

Reinigung

Vor der Reinigung muss der FLO Flexi Adapter vom Schlauch-, Auslass- und Maskensystem getrennt werden.

Der FLO Flexi Adapter darf nur mit einer milden Seifenlauge gereinigt werden. Andere Reiniger können den FLO Flexi Adapter beschädigen. Die Reinigung des Adapters sollte täglich erfolgen. Nach der Reinigung muss der FLO Flexi Adapter mit ausreichend klarem Wasser nachgespült werden und rückstandsfrei trocknen bevor er wieder eingesetzt werden darf.

Achtung! Der FLO Flexi Adapter darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden!

Standzeit

Die empfohlene Standzeit beträgt bei sachgemäßer Handhabung 36 Monate.

Bei einem Defekt, sind die betroffenen Teile sofort auszutauschen.

Lagerung

- Originalverpackt, trocken und kühl lagern
- Nicht direktem Sonnenlicht oder UV-Licht aussetzen

Entsorgung

Der FLO Flexi Adapter ist nach Ablauf der Standzeit über den Hausmüll zu entsorgen.

Ersatzteile

Artikelnummer	Bezeichnung
51000050	Drehgelenk
30900050	Silikonmanschette

Technische Daten**Material:**

Drehgelenk: TECAFORM AH MT blau

Silikonmanschette: Silikon Elastosil LR 3003, transparent

Abmessungen:

Drehgelenk: I - \varnothing 19 mm
A - \varnothing 23 mm
Länge: 53 mm

Silikonmanschette: I - \varnothing 21,5 mm
A - \varnothing 34 mm
Länge: 50 mm

Länge gesamt: 90 mm

Strömungswiderstand: 50L/min (833,33ml/s)
= 0,05 hPa (\approx 0,05 cmH₂O) Druckabfall

100L/min (1666,66ml/s)
= 0,14 hPa (\approx 0,14 cmH₂O) Druckabfall



FLO Medizintechnik GmbH
Westhoyeler Str. 25
D-49328 Melle
Germany

fon. +49 5226 - 98 30 47
fax. +49 5226 - 98 78 75

info@flo-medizintechnik.de
www.flo-medizintechnik.de

 **FLO**
MEDIZINTECHNIK